



Tomáš Slavíček
Servis a prodej zdravotnické techniky
Kamenická 811/35, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 603 440 557, e-mail: info@physiomed.cz
www.physiomed.cz

SIL-K

Silikonový plátek pro léčbu problémových jizev

SIL-K je tenký, pouze 0,5 mm silný, samonosný silikonový plátek dodávaný lékárnám a lékařům v rozměrech 10 x 30 cm, případně 10 x 20 cm a 10 x 10 cm.

Hlavní indikace:

- zmenšení a změkčení hypertrofických jizev na kosmeticky únosnou míru
- snížení výšky, vylepšení textury a barvy až úplné odstranění keloidních jizev
- léčba jizev po akné

Kontraindikace:

- nesmí být použit nesterilní na nezhojenou kůži
- nesmí být použit při alergické reakci

Souhrn:

Silikonové plátky **SIL-K** jsou vhodné na keloidní jizvy, jizvy po popáleninách (nejúčinnější je aplikace v okamžiku vzniku epitelu), na jizvy po chirurgických zákrocích včetně kontraktur (staženin), na jizvy po akné, jizvy po očkování a radu typu hypertrofických a atrofických jizev.

SIL-K lze výhodně kombinovat s kompresní léčbou a s chirurgickou (kryochirurgickou) metodou odstraňování problémových jizev. Silikonový materiál je mimořádně vhodný při ošetřování popálenin, neboť se svými vlastnostmi blíží teoretickým požadavkům - má výrazný léčivý účinek, tvoří antibakteriální bariéru, je propustný pro vodní páry, dovoluje výměnu plynu, jeho mechanické vlastnosti (extensibilita) se blíží vlastnostem kůže.

SIL-K je příjemný na dotek, snadno se aplikuje i odstraňuje, je mimořádně trvanlivý (aplikovaný plátek postačí na celou dobu léčby), je neantigenní a lze jej tedy přikládat přímo na popáleniny s malou nebo žádnou vrstvou exudátu a lze jej sterilizovat (v autoklávu, etylenoxidem a gama zářením). Tyto vlastnosti jej předurčují jak pro rozsáhlé klinické, tak pro drobné domácí aplikace.

Účinnost léčby:

Podle zahraničních a tuzemských zkušeností je dosahováno efektivity 70 - 100 % v závislosti na typu a stáří jizvy.

Historie:

Účinek silikonových plátek na jizvy byl zjištěn víceméně náhodně v roce 1981 v Austrálii, jako vedlejší produkt výzkumu zabývajícího se nalezením vhodného materiálu na rovnoměrné rozložení tlaku při kompresní léčbě jizev po popáleninách. Jako jedna z možných variant byly testovány i silikonové materiály, které se již dříve používaly k podobným účelům ve sportovní obuvi. Praxe pak ukázala, že silikonový plátek lze nejen využít k rovnoměrnému rozložení tlaku, ale že pouhé jeho přiložení přináší výrazný léčebný efekt. Současná podoba silikonových plátek určených k léčbě jizev bez aplikace tlaku je taková, aby nedocházelo k odírání a dráždění okolí léčebného místa a tím ke snižování efektu léčby vedlejšími účinky.

Manipulace:

Manipulace se silikonovým plátkem SIL-K je mimořádně jednoduchá. Vystříháme nebo vyřízneme plátek tak, aby pokryl jizvu a připevníme jej nedráždivou náplastí (např. Omnifix Hartmann, Omnipor apod.). Jedenkrát denně plátek SIL-K sejmeme, jizvu i plátek omyjeme nedráždivým mýdlem, dokonale osušíme a znovu připevníme. Na pokožku ani na SIL-K nesmí být při aplikaci nanášeny žádné zevní léky ani kosmetické přípravky!

Zahraníční zkušenosti:

Dětská klinika v Adelaide, Austrálie. Oddělení popálenin.

Silikonový materiál byl aplikován 42 dětským pacientům. Ve 100 % případu došlo k výraznému zlepšení. Léčba byla subjektivně hodnocena jako praktická, nenáročná a bezbolestná.

Royal Hospital, Skotsko, oddělení popálenin (prof. W. H. Reid)

Silikonový materiál byl postupně (v rozmezí let 1983 až 1986) testován na 125 pacientech s těmito výsledky:

- u 75 pacientu (60 %) došlo k výraznému zlepšení po léčbě trvající 2 měsíce;
- u 17 pacientu (13,6 %) se objevila vyrážka způsobená nedodržením hygienických zásad;
- 33 pacientu (26,4 %) se nedostavilo ke kontrole.

Po přepočtu na skutečně sledovaný vzorek (92 osob) je tedy úspěšnost léčby 81,5 %.

Tuzemské zkušenosti:

Kožní ambulance léčebného a rehabilitačního centra Opava, kožní ambulance Hlučín (MUDr. Němcová)

Velmi dobré výsledky (statisticky nezpracováno) u dětí i dospělých osob (vzorek 40 pacientu).

Nejrychlejší efekt u strangulující jizvy u chlapce ve věku 6 let. Efekt po 14 dnech. S úspěchem používána kombinace kryalizace a SIL-K na reziduálním keloidu - dochází k výraznému zkrácení léčby.

Nestátní zdravotnické zařízení Havířov (MUDr. Komár)


U vzorku 10 pacientu bylo ve 2 případech dosaženo dobrých, v 6 případech velmi dobrých výsledku. Ve 2 případech došlo k úplnému zahojení (Jizvy po poranění bez chirurgického zákroku, jizvy po akné conglobata a jizvy po chirurgickém zákroku).

Ve všech případech je oceňována nenáročnost aplikace a minimální zatížení pro pacienta.

před aplikací Sil-k



po aplikaci Sil-k

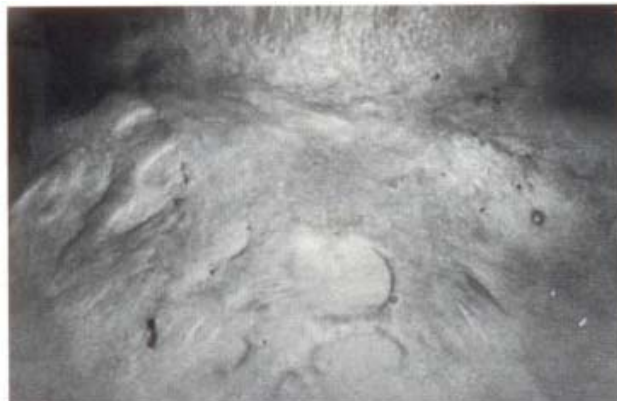

Objednací podmínky:

SIL-K je lékárnám a lékařům dodáván v rozměrech 10 x 30 cm, příp. 10 x 20 cm a 10 x 10 cm. Mimořádně lze po dohodě dodat jiné rozměry. Při objednávce uvádějte požadovaný rozměr.

Dodací podmínky:

Zaslání poštou nebo osobní odběr.

Platební podmínky:

Úhrada: v hotovosti, dobírkou, zálohová faktura.